



Гebrauchsanleitung

- > Nach der mechanischen Reinigung der Pulpa-Kammer, einen Tropfen der Lösung in den Wurzelkanal applizieren; entweder mit einem Wattekögelchen oder einer entsprechenden Plastikpipette
- > Lösung ca. 1 Minute einwirken lassen und Füllung anschließend mit einer Feile welche vorgängig in der Lösung getränkt wurde entfernen. Vorgang wiederholen sobald sie einen Widerstand spüren und solange, bis der Kanal bis zum Apex frei ist
- > Nach der Entfernung und vor dem Einsetzen einer neuen Füllung den Kanal gründlich spülen, reinigen, und trocknen

Warnung

Eine sehr geringes Risiko einer Überempfindlichkeitsreaktion kann nicht ausgeschlossen werden.

Lagerung

Bei Raumtemperatur zwischen 5°C und 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung

Flasche 15 ml

REF
11555



- > FÜR DEN PROFESSIONELLEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH
- > HERGESTELLT IN DER SCHWEIZ



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Eugenate Desobturator

Раствор для распломбирования корневых каналов, obturированных цинк-оксид-эвгенольными цементами и гуттаперчей.

Состав

Апельсиновое масло.

Описание

Препарат вызывает размягчение постоянных пломбировочных материалов для корневых каналов (цинк-оксид-эвгенольных цемента и гуттаперчи) и облегчает их механическое удаление.

Показания

Дезобтурация корневых каналов, запломбированных цинкоксидаэвгенольными цементами и гуттаперчей.

Способ применения

- > Удалить пломбировочный материал из пульпарной камеры
- > С помощью ватного шарика или пластиковой пипетки поместить небольшое количество препарата

Eugenate desobturator на устья каналов

- > Оставить на 1 минуту для достижения эффекта
- > Смочить подходящий эндодонтический инструмент раствором препарата и механически удалить размягченный материал
- > Повторять процедуру до тех пор, пока корневой канал не будет полностью дезобтурирован.
- > Механически и медикаментозно обработать корневой канал перед новым пломбированием

Предупреждение

В очень редких случаях может вызывать гиперчувствительность.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в защищенном от прямого света месте.

Упаковка

Флакон 15 ml

Арт.
11555



- > ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
- > СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ